

Anwendungsgebiete:

Desinfektion, Aufbewahrung und Benetzung für alle Arten von Kontaktlinsen



Gebrauchsanleitung:

Gründlich die Hände waschen. Massieren Sie die Kontaktlinsen mit einigen Tropfen pur Kombilösung in der Handfläche. Anschließend kurz mit pur Kombilösung abspülen. Die Kontaktlinsen in den entsprechenden Behälter legen. Den Kontaktlinsenbehälter mit pur Kombilösung füllen. Belassen Sie die Kontaktlinsen mindestens 4 Stunden oder besser über Nacht in der Lösung. Längstens 7 Tage in der gleichen Lösung aufbewahren. Die Kontaktlinsen vor dem Einsetzen kurz mit pur Kombilösung abspülen.

 ESOFORM s.r.l.
Laboratorio Chimico
Viale del Lavoro, 10
45100 Rovigo - Italia

PRO
LOGIS.

Exklusivvertrieb:
PROLOGIS GmbH & Co. KG
Hohe Koppel 7
25842 Langenhorn
www.prologis-gmbh.de



Zusammensetzung:

Polyesametylenbiguanid 0,0001%, Dinatrium-edetat 0,1%, Pluronic F127, PVP, Polyquaternium 2, hergestellt bis zu 100% mit Bindemitteln und gereinigtem Wasser

Ergänzende Hinweise:

Das Produkt ist nur vor dem Öffnen steril. Die Flasche nach Gebrauch gut verschließen. Nach Öffnen der Flasche innerhalb von 60 Tagen aufbrauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor Wärmequellen schützen. Nicht einnehmen. Nicht verwenden, wenn der Originalverschluss beschädigt ist. Für jeden Gebrauch frische Kombilösung verwenden. Pflegemittel nicht mit anderen Produkten mischen. Bei Irritationen Linsen herausnehmen und Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen. Aufbewahrungstemperatur 5–25 °C.



CE
0425
STERILE | A

Sterilisiert
durch
Filtrierung



Flasche aus
recyclbarem
Material

LOT



pur[®]
KOMBILÖSUNG

COD 10402E026 Rev. 2021/01/04